

## ●セット内容および希望小売価格

規格名	対象部位	部位の説明および使用者の目安	販売単位	希望小売価格
パッケージA	全身対応用	足首用、ひじ用、手首・指用、アキレス腱・接続用	6セット/1箱	¥21,000
パッケージB	くび用(L)	首(使用者の目安、身長170cm以上の成人男子)	5セット/1箱	¥10,000
パッケージC	くび用(S)	首(使用者の目安、身長170cm以下の成人男性、女性、子ども)	5セット/1箱	¥10,000

●パッケージAには、付属品として緩衝材×2と布バンドが同梱されています。●首回りの太さには個人差がありますので、使用者の目安は参考です。●価格は税別です。

## ●その他、ご使用に際しての留意事項

### ! 使用上の注意

- 損傷部位に出血がある場合、必ず先に患部の止血措置を行うこと。
- 固定措置後、速やかに医師の診断を受けること。
- 皮膚が赤みを帯びたり、しびれ感があったり、腫れ上がった場合は使用を中止すること。
- 身体と本品に隙間がある場合、添付の緩衝材その他の手段で隙間を埋めて固定すること。
- 固定用テープによる固定がゆるい場合には、その他の手段(三角巾、ネクタイ、バンドナなど)でしっかりと固定すること。
- 必要に応じてアイシングを行うこと。
- 出血がある場合、できるだけ患部を心臓の位置より高くすること。


### ! 保管方法および有効期間等

- 保管時は水漏れ厳禁、火気厳禁、湿気・光を避けること。

### ! 取扱い上の注意

- ダンボールの裁断面でのけがに注意すること。
- 本品に破損、変形、汚染等がある場合、使用しないこと。
- 本品に水がかからないように注意すること。
- 本製品は紙製のため、着火すると燃える可能性があります。特にタバコを吸いながらの着用は危険です。
- 本製品は食べられません。子どもが口に入れないように注意願います。


## ●商品概要およびサイズ

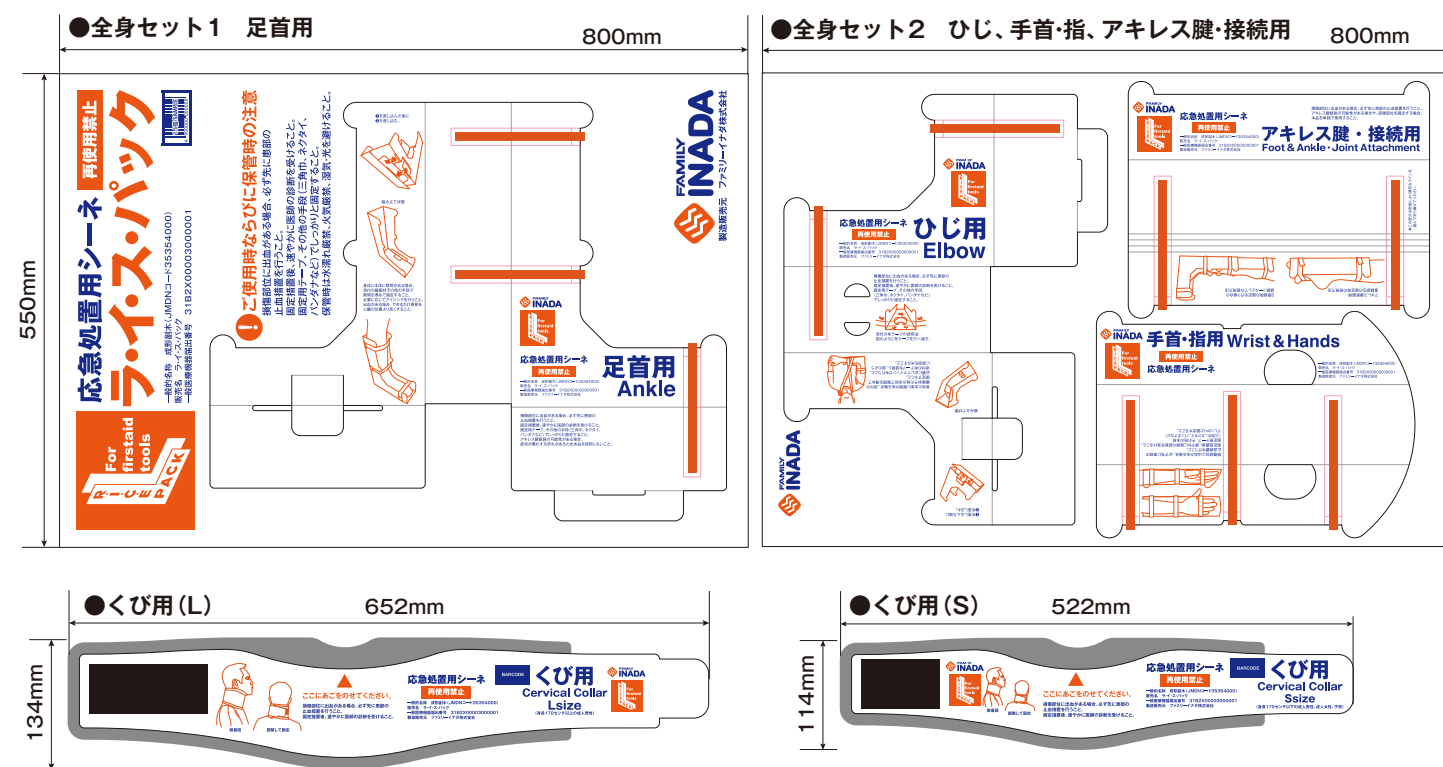

### 商品構成材料

構成	原材料
本体シート	撥水ダンボール
固定テープ	フィルム法合成紙
接着テープ	不織布、アクリル系粘着剤
面ファスナー	ナイロン6、ナイロン66
(付属品)	
布バンド	綿、レーヨン
緩衝材	発泡PE

### 取り扱い代理店

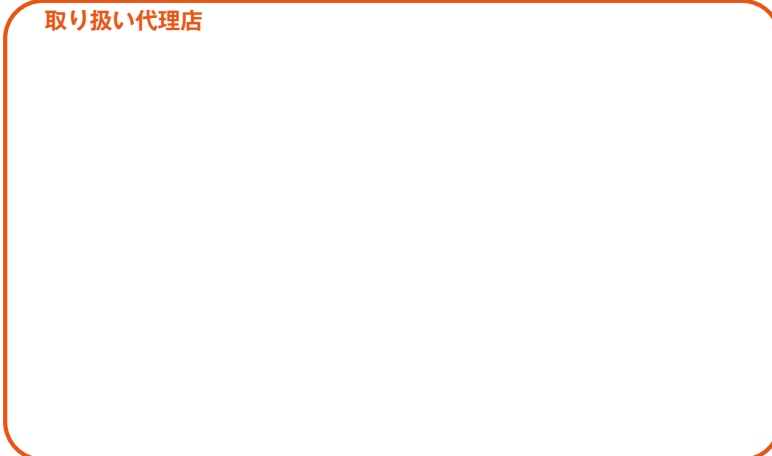

いつでも、どこでも、だれにでも  
安価で扱いやすく、機能性にもすぐれた  
ファーストエイドキット  
「ラ・イス・パック」は医療機器です

## 応急処置用簡易シーネ

# R・I・C・E PACK

## ラ・イス・パック™



一般名称 成形副木(JMDNコード35354000)  
販売名 ラ・イス・パック  
一般医療機器届出番号 31B2X00003000001  
製造販売元 ファミリーイナダ株式会社

本製品の組立て方、使用方法は、下記ウェブページで閲覧できます。

[www.sun-pack.net](http://www.sun-pack.net)

